

第4版 2022年5月24日

ウェルサイン
抗原/抗体検査キット・管理WEBアプリ使用方法

【はじめに】

本システムは、ウェルサイン社が提供するコロナウィルス抗原検査キット(ウェルサイン™-COVID19Ag)、抗体検査キットの検査結果をWEB上で管理するWEBアプリの使用方を記載しています。

ご使用にあたっては、WEBアプリの利用規約、ご使用の検査キットの取扱説明書をお読みの上、お使いください。

利用環境
カメラ付きスマートフォン
(iOS、android)
推奨ブラウザ: google chrome

※インターネットへの接続が必要です。
※推奨ブラウザ以外では不具合が生じる可能性があります。
※カメラの解像度によっては、うまく認識できない場合があります。
※ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。

【目次】

[1.登録とログイン](#)[1-1 新規登録](#)[1-2 パスワード再登録](#)[1-3 マイページへのログイン](#)[2. マイページの操作方法](#)[2-1 登録個人情報の確認、編集方法](#)[3. 抗原検査](#)[3-1 検査結果アップ方法\(撮影方法\)](#)[3-2 検査結果確認方法](#)[3-3 検査結果の共有](#)[4. 抗体検査](#)[4-1 検査結果アップ方法\(撮影方法\)](#)[4-2 検査結果確認方法](#)[5. イベント機能](#)[5-1【幹事用】イベントの作成](#)[5-2【幹事用】イベントURLの取得](#)[5-3 陰性確認結果の保存](#)

1.登録とログイン


1-1 新規登録

① カメラ付きのスマートフォンで下記アドレスにアクセスします。(推奨ブラウザ: google chrome、インターネットへの接続が必要です。)
<https://welsign.azurewebsites.net/login/>



(QRコード)

②【新規登録】をクリックします。
最新の取扱説明書は右下の【サイトのご利用方法】から御覧頂けます。

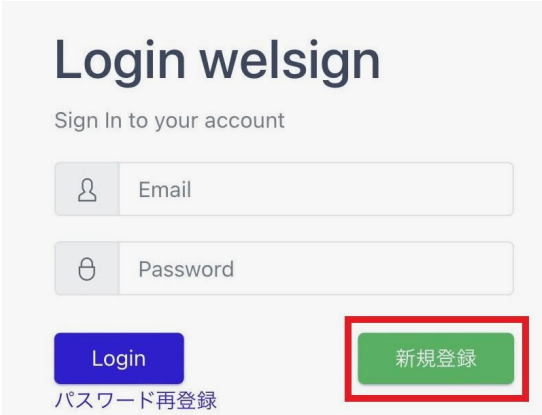A screenshot of the login page for 'welsign'. It features a title 'Login welsign' and a subtitle 'Sign In to your account'. There are two input fields: 'Email' with a person icon and 'Password' with a lock icon. Below these are two buttons: a blue 'Login' button and a green '新規登録' (New Registration) button. The '新規登録' button is highlighted with a red rectangular border. At the bottom, there is a link 'パスワード再登録' (Reset Password).[サイトのご利用方法](#)

- ③ 入力欄に情報を全て入力し、利用規約を必ず確認の上、チェックマークをつけて【登録】をクリックします。

抗原検査キットUploadサイト

名前 Username

身分証明書と同じ名称を入力してください。

メールアドレス Email

性別 選択してください

生年月日

パスワード Password

パスワード Repeat password

☐ 利用規約に同意します。

登録

- ④ 登録したメールアドレスに確認用のメールが届くので、【メールアドレス確認】をクリックします。これで新規登録は完了です。

※登録したメールアドレスとパスワードは、ログイン時に毎回使用します。パスワードを忘れた場合は、パスワードの再登録をしてください。

お知らせ

ボタンをクリックして、登録されたメールアドレスを確認してください。

メールアドレス確認

このメールの内容に覚えがない場合は、このまま破棄してください。

どうぞ、よろしくお願い致します、

WELSIGNSITE

“メールアドレス確認”ボタンをクリックできない場合は、こちらのURLをコピーしてブラウザに貼り付けてください: <https://welsign.azurewebsites.net/email/verify/900937-expire=1639037005&signature=03e788a969b931f5e1b483005b19e8b8b9708af1a32b64af8b9ad76bd7e8bb11>

メール画面イメージ

1-2 パスワード再登録

- ① パスワードを忘れてしまった時やパスワードを変更したい時には、ログイン画面の【パスワード再登録】から再登録できます。

Login welsign

Sign In to your account

Email

Password

Login

新規登録

パスワード再登録

- ② 新規登録の際に登録したメールアドレスを入力し、送信してください。

パスワード再登録


メールアドレス

送信

- ③ 入力したメールアドレスにパスワードを再設定する画面へのリンクが送られてくるので、画面の指示に従ってパスワードを再設定してください。

1-3 マイページへのログイン

① 登録したメールアドレスと設定したパスワードを入力し、【Login】をクリックします。

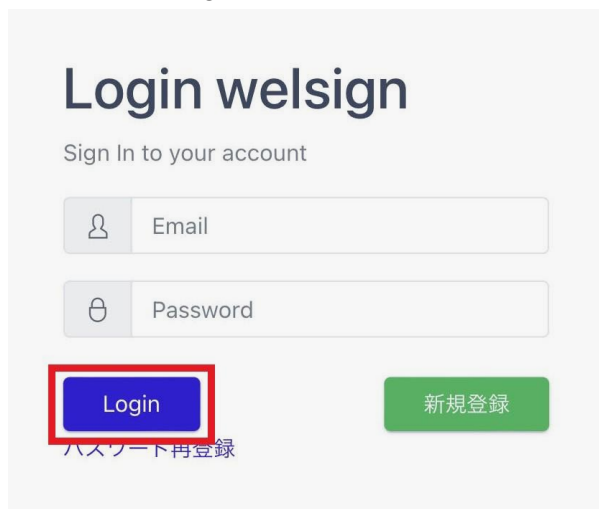

Login welsign

Sign In to your account

Email

Password

Login

新規登録

パスワード再登録

② ログインすると下記のトップ画面に遷移します。



抗原検査キットUpload

山田 太郎

検査結果一覧


抗原検査Upload

抗体検査Upload

2. マイページの操作方法

2-1 登録個人情報の確認、編集方法

① 登録個人情報を確認、編集したい際は、画面右上に表示されている登録者名をクリックしてください。

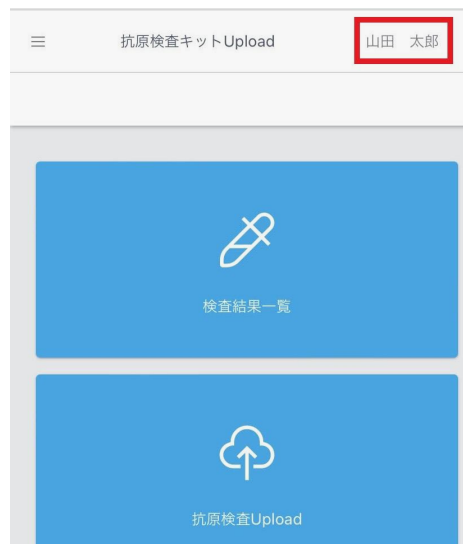

抗原検査キットUpload


山田 太郎

検査結果一覧

抗原検査Upload

② 登録した個人情報が表示されます。変更したい箇所を変更し【update】をクリックすると、変更が反映されます。

企業コードをお持ちの方はご入力ください。

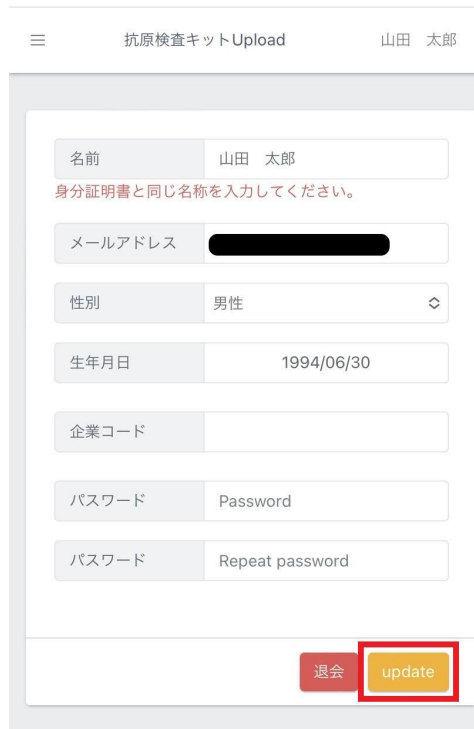

抗原検査キットUpload

山田 太郎

名前 山田 太郎

身分証明書と同じ名称を入力してください。

メールアドレス

性別 男性

生年月日 1994/06/30

企業コード

パスワード Password

パスワード Repeat password

退会 update

3. 抗原検査

3-1 検査結果アップ方法(撮影方法)

① 抗原検査を行った検査キットを用意し、トップ画面の【抗原検査結果Upload】の画面へ移動してください。



iPhone等を利用している場合、検査結果アップロード画面に遷移した時に、下記のようにブラウザでのカメラアクセスを要求するアラートが表示される事があります。



※iPhone等でアラートが表示されない場合、ブラウザでのカメラアクセスが許可されていない可能性があります。その場合、【設定アプリ】>【お使いのブラウザ名(Chromeなど)】>【カメラ】をオンにすることで、許可がされます。(ご利用の環境で設定方法が異なる場合があります。)



② 撮影画面が表示されますので、撮影画面内の枠に検査キットが収まるようにカメラを向けると、シャッター音が鳴り自動撮影が行われます。(iPhone以外)

※ iPhoneの場合は検査キットが自動で撮影された際、画面右上に「撮影しました」のメッセージが表示されます。



※枠に検査キットが収まっていない場合は自動撮影が行われません。

自動撮影モードでうまく撮影できない場合は取消ボタンで取消を行えば、撮影ボタンを使った手動モードでの撮影が可能です。



※【シリアル】欄は検査キットにシリアルナンバーが記載されている場合に入力してください。（記入なしでもアップロードは可能です。）

③ 検査結果を撮影後、【検査結果】の欄で（陽性）（陰性）を選択して【Upload】をクリックしてください。これで登録は完了です。



3-2 検査結果確認方法

① 検査結果を確認するには、トップページから【検査結果一覧】を選択します。



② 検査結果記録が登録日時順で一覧となって表示されます。



③任意の検査結果登録日時を選択すると、検査結果が確認できます。(アップした写真データは2週間で削除されます)

3-3 検査結果の共有

企業コードを登録済みの方は、企業内メンバーへの検査結果の共有が可能です。

①共有したい検査結果の下にある【共有】をタップします。

②検索窓に、管理者等の共有したい方の氏名、もしくはメールアドレスを入力し、検索します。

③表示結果から共有したい方の右側にある【追加状態】を選択し、【保存】をタップします。これで共有完了です。


共有されると、共有者にはお知らせメールが届きます。

④共有を解除する場合は、【追加状態】をはずし、【保存】をタップします。

4. 抗体検査

4-1 検査結果アップ方法(撮影方法)


① 撮影前に検査キット専用台紙の青枠【キット設置位置】に沿って検査キットを配置してください。

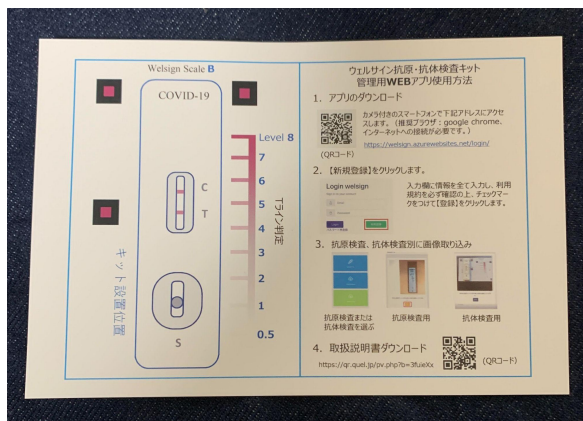

② アプリトップページの【抗体検査結果Upload】の画面へ移動してください。



iPhone等を利用している場合、検査結果アップロード画面に遷移した時に、下記のようにブラウザでのカメラアクセスを要求するアラートが表示される事があります。

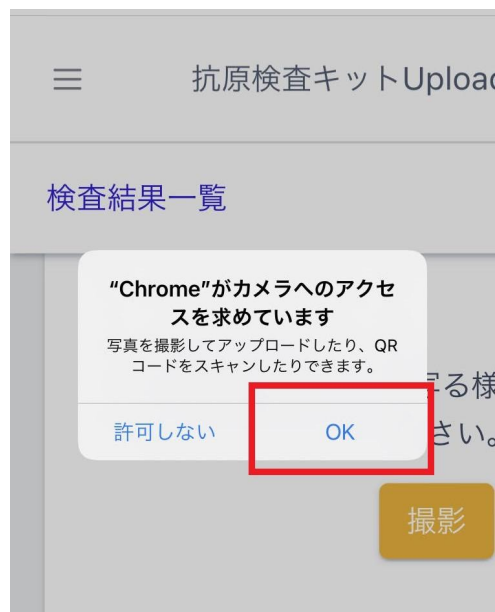


※iPhone等でアラートが表示されない場合、ブラウザでのカメラアクセスが許可されていない可能性があります。その場合、【設定アプリ】>【お使いのブラウザ名(Chromeなど)】>【カメラ】をオンにすることで、許可がされます。(ご利用の環境で設定方法が異なる場合があります。)



③ 撮影画面内の白枠を検査キットおよび検査キットの周りの四角面に合わせてカメラを向けると、シャッター音が鳴り自動撮影が行われ、【撮影】ボタンの色がオレンジからグレーに変わります。手動でも撮影できます。

検査結果一覧

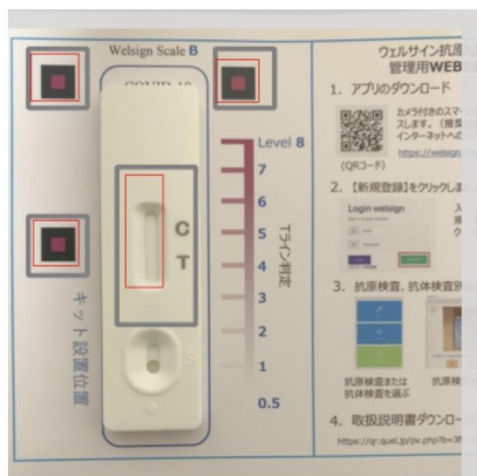


枠内に検査キットが写る様に写真を撮影してください。

取消

シリアル

※【シリアル】欄は検査キットにシリアルナンバーが記載されている場合に入力してください。(記入なしでもアップロードは可能です。)

④ 【検査結果】欄で、検査キットのTの左部分に浮き出たラインの色の濃さを、台紙の右側のスケール(色見本)と比較し、一番近いスケール(色見本)のレベルを選択します。

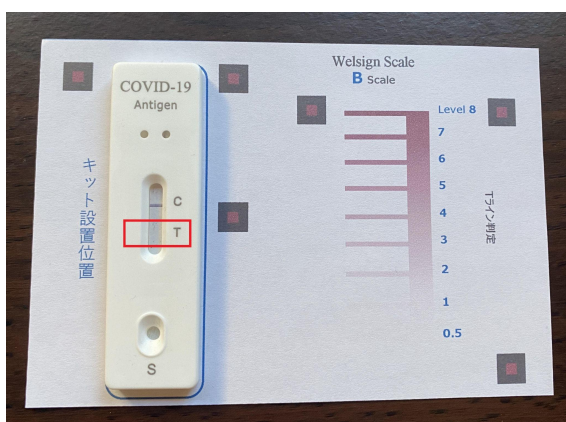

シリアル

検査結果

選択してください

完了

LEVEL5
LEVEL6
LEVEL7以上

判定不能

⑤ 検査結果についての確認事項にチェックを入れ、【save】してください。

- ☒ 本結果は私（登録者本人）の検査結果に間違いありません。
- ☒ 本結果は検査後30分以内の検査結果に間違いありません。

save

cancel

4-2 検査結果確認方法

① 検査結果を確認するには、トップページから【検査結果一覧】を選択します。



② 検査結果記録が登録日時順で一覧となって表示されます。



5. イベント機能

イベント機能は会合や行事の際に、参加メンバーの抗原検査結果をイベント毎に確認・管理するのに便利な機能です。

幹事がイベントを作成し、参加者にURLを送ることで利用できます。

5-1【幹事用】イベントの作成

① 会合の幹事や主催者がイベントを作成します。イベント毎に作成が必要です。



② 【イベント】一覧ページの【追加】ボタンからイベントを作成し、【イベント名】を入力して【save】してください。



③ 【イベント】一覧ページにて新規作成したイベントが追加されているのを確認してください。

抗原検査キットUpload 山田 太郎

検索結果: 2 件 1 追加

イベント名	管理者	検査確認
20220314テストイベント		確認済み
20220317テストイベント	山田 太郎	未確認

1

- ④ 【イベント名】をタップすると、作成したイベントの個別ページへ画面遷移します。

抗原検査キットUpload 山田 太郎

イベント一覧 編集

イベント名
20220317テストイベント

イベント作成者
山田 太郎

参加URL
https://welsign.azurewebsites.net/controlpanel/generaluserpersonal/groups/entry/620F17F8-2E72-4929-A802-1CB5FB3B2E01

まだ検査確認されていません。検査確認をする場合はイベント管理者が検査確認ボタンをクリックしてください。

検査確認

5-2 【幹事用】イベントURLの取得

- ① イベント個別ページに【参加URL】が表示されるので、URLのリンクをコピーし、会合や行事

の参加者にメールやLINE等でURLをお送りください。

イベント一覧 編集

イベント名
20220317テストイベント

イベント作成者
山田 太郎

参加URL
https://welsign.azurewebsites.net/controlpanel/generaluserpersonal/groups/entry/620F17F8-2E72-4929-A802-1CB5FB3B2E01

※参加メンバーがURLをタップすると、本イベントの参加メンバーとして自動追加されます。(本WEBアプリのユーザー登録がまだの方は、登録ページが表示されますので、ユーザー登録技に再度、送られたURLをタップしてください。)

各イベントのページから、参加者の検査状況が確認できます。氏名の右にある【脱退】をタップすると、イベントメンバーから脱退します。メンバーの検査状況は、全参加メンバーが確認できます。

5-3 陰性確認結果の保存

- ① 作成したイベントページ内の【検査確認】ボタンをタップすることで、イベント当日の参加者の陰性確認が保存されます。タップした時点での情報を保存します。(注意【検査確認】をタップしないと保存されません。運用的にイベントが始まる少し前に保存することが望ましいです。)

参加者に無効・未検査のステータスの方がいる場合も、結果の保存は可能です。その場合は備考欄に理由を残してください。これも保存されます。

参加URL
https://welsign.azurewebsites.net/controlpanel/generaluserpersonal/groups/entry/620F17F8-2E72-4929-A802-1CB5FB3B2E01

まだ検査確認されていません。検査確認をする場合はイベント管理者が検査確認ボタンをクリックしてください。

検査確認

ああ welsign.azurewebsites.net

☒ 全員の抗原検査結果を確認しました。
☒ 陽性者がいない事を確認しました。
☒ イベント管理者又はイベント管理者の代理で検査確認を行います。

特記事項があれば自由に入力ください。

ok cancel

② 最終確認の画面が表示されるので、OKをタップすることで、参加メンバーの検査記録が保存されます。

※記録保存後は、変更・削除する事は出来ません。

「検査確認」をしてよろしいですか？
検査確認後は、変更・削除する事は出来ません。

ok cancel

③ 検査確認状況は、イベント個別ページの下部に【参加人数】、【有効(陰性)】、【無効・未検査】、参加メンバーの個別結果が一覧となって表示されます。

イベント一覧

4 人
有効 (陰性)
4 人
無効・未検査
0 件

ユーザー名	有効期限	抗原検査結果	検査日時
スズキ イチロウ	6:31	陰性	2022/03/14 05:53:37
ヤマダ ハナコ	3:48	陰性	2022/03/14 14:20:56

提 供:ウェルサイン株式会社
 住 所:東京都板橋区成増3-40-3-802
 電話番号:03-6783-2648